



EMODIAL



EXIT-POCKET® WP



EMODIAL

Via Finati, 4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com



Ref. DE0013H.USMED - Rev. 06/2019

**Wasserdichter Beutel
für den Katheterschutz**

EXIT-POCKET® WP

Beschreibung

Wasserdichter Beutel für den Katheterschutz. Die Öffnung ist komplett mit einem Klebepflaster umgeben, um ihn auf der Haut zu fixieren. Auch mit Öffnungs-/Schließsystem auf der Unterseite verfügbar.

Indikation

Sicherung der Katheterenden während des Duschens und der Patienten-Hygiene. Geeignet für Duschen und Baden (Tauchen). Das geschlossene Modell wird empfohlen, wenn kein langer Kontakt mit Wasser erforderlich ist.

Modelle, die mit dem Öffnungs-/Schließsystem an der Unterseite ausgestattet sind ermöglichen es die innenliegenden Katheterenden und/ oder den Verband neu zu positionieren.

Zweck

Entwickelt, um den Katheter-Exit vor Kontakt mit Wasser zu schützen. Der Beutel ist bei guter Positionierung komplett wasserdicht und schützt damit den Katheter-Exit vor Wasser, um mikrobielle Kontaminationen zu vermeiden.

Vorteile

- Schnelles, einfaches Anbringen.
- Bequeme Passform.
- Steigert die Lebensqualität katheterisierter Patienten.
- Einfache und schnelle Entfernung.



Wasserdichter Beutel für den Katheterschutz

Gebrauchsanweisung

1. Abdecken der Katheterenden mit dem Beutel.
2. Entfernung der Schutzfolie von der Klebefläche.
3. Platzieren Sie den unteren Teil der Öffnung in Übereinstimmung mit der Unterseite des Katheter-Exit. Komplettieren Sie dann die Verbandbefestigung von unten nach oben. Dabei unbedingt Falten und Lufteinschlüsse vermeiden.
4. Während des Duschens oder Badens darauf achten, dass nicht im Bereich der Klebeflächen geschrubbt wird.
5. Lösen Sie sanft einen schmalen Streifen der Klebefläche am unteren Teil des Beutels. Ziehen Sie dann in kleinen Schritten von unten nach oben die gesamte Schutzfolie ab.



Bestelldaten

Daten und technische Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern

CODE	PZN	GRÖÖE (cm)			INDIKATION	Stck. BOX
		Öffnung	L	H		
S2005H/WP	12535657	ø 5	11	22	Bad und Dusche	50
S2011H/WP	12535686	10 x 9	13	26	Bad und Dusche	50
S2013HL/WP	14141247	13 x 11	17,6	30	Bad und Dusche	50
S2013H/WP	14141253	11 x 13	15,6	30	Bad und Dusche	50

KLASSIFIKATION • MEDIZINPRODUCT - KLASSE I
BIOKOMPATIBILITÄT • IN ÜBEREINSTIMMUNG UNI EN ISO 10993 STANDARD
STERILIZATION • UNSTERILE
HALTBARKEIT • 2 JAHRE



• ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG